


## UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR

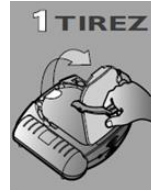


### ÉTAPE 1 : TIRER LA POIGNÉE VERTE

1. Mettre en marche en tirant sur la poignée verte.
2. Retirer la protection rigide de la cartouche d'électrodes.
3. Mettre à nu la poitrine du patient. Au besoin, déchirez ses vêtements.




### ÉTAPE 2 : PLACER LES ÉLECTRODES


1. Retirer timbre médicamenteux, écouteur et autres appareils.
2. Tirer sur la languette située en haut pour détacher la pellicule adhésive. À l'intérieur, deux électrodes adhésives sont placées sur une doublure en plastique.

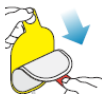

3. Décoller une électrode.
4. Placer l'électrode sur la peau comme l'indique le croquis sur l'électrode.
5. Appuyer fermement sur l'électrode. Ensuite, faites la même chose avec l'autre électrode.
6. Le défibrillateur analyse le rythme cardiaque.

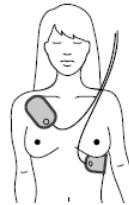

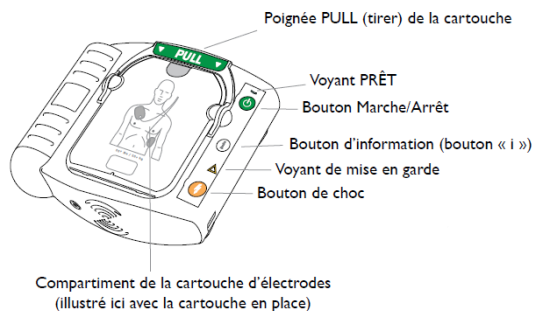


Il vous indique que personne ne doit toucher le patient, et le voyant de mise en garde se met à clignoter.





### ÉTAPE 3 : INSTRUCTIONS AVANT D'APPUYER SUR LE BOUTON DE CHOC

**Si l'administration d'un choc est nécessaire**  
**Suivre les instructions vocales du défibrillateur**

1. Le  ne clignote **plus** et s'allume **en continu**. Le défibrillateur vous indique d'appuyer sur le bouton orange clignotant. **Personne ne touche la personne en difficulté.** 
2. Il vous indique que le choc a été administré, puis fait une pause pour vous permettre de pratiquer la RCR (massage), au besoin. (Appuyer sur le bouton i bleu pour obtenir des directives sur la RCR) 
3. Il analyse le rythme cardiaque de nouveau pour déterminer si l'administration d'un nouveau choc est nécessaire. Si on n'appuie **pas** sur le bouton Choc dans les 30 secondes qui suivent l'instruction, le défibrillateur se désarme automatiquement.

**Si aucun choc n'est nécessaire :**

1. Le défibrillateur vous indique que vous pouvez toucher le patient (le voyant de mise en garde s'éteint). 
2. Vérifier l'état du patient. Il est possible que la personne ne soit pas en arrêt cardiaque et qu'elle nécessite un autre type d'intervention médicale.
3. Si la personne respire, la RCR n'est pas nécessaire.   
Si la personne ne respire pas, pratiquer la RCR.
4. Assurez-vous que les services médicaux d'urgence ont été appelés.

(Ref : Défibrillateur HeartStart, Manuel d'utilisation, PHILIPIS, M5066A)